

操作講習について


1. 操作講習の受講

- 可搬型階段昇降機を操作するには、操作講習を必ず受講していただきます。
- 新型3種の操作講習は、介護保険レンタルの場合は可搬型階段昇降機安全指導員が、ご購入の場合は可搬型階段昇降機安全指導員講師がおこないます。操作前に資格証の確認をしてください。
- 新型3種の資格証には、scalamobil S45・scalacombi S46・scalaport S45X7の表記がされています。
- 受講後に修了証明として「操作者講習確認書」を発行します。発行後にスカラモービルを操作することができます。


2. 操作者の条件

- ① 年齢は原則16歳以上、70歳以下である
- ② 身長は原則150cm以上である
- ③ 体重は原則45kg以上である
- ④ 後ろ向きに階段を上ることができる
- ⑤ 両手・両足に不自由がなく、一定の握力を有していること
- ⑥ 視覚や聴覚に問題がないこと
- ⑦ 発作性の病気をもっていないこと、認知症の症状がないこと


使用環境について

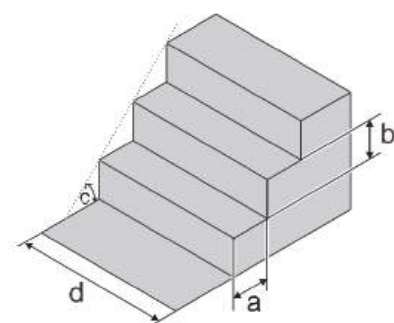

- a: 階段奥行き 11cm以上
b: 階段の高さ 20cmまで
c: 昇降可能角度 61度
d: 階段の幅 55cm以上

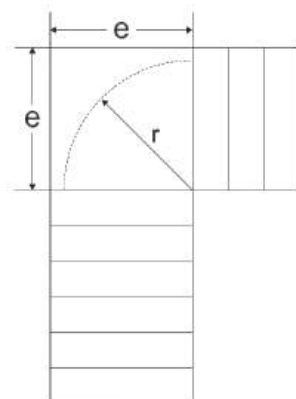

- L字型階段の踊り場
e: 100cm以上
r: 半径100cm以上

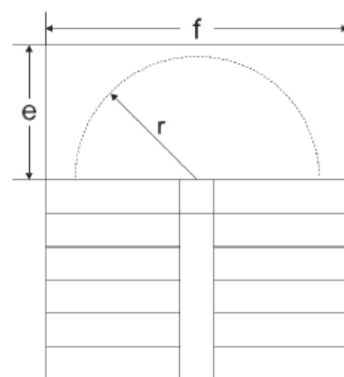

- U字型階段の踊り場
e: 100cm以上
f: 200cm以上
r: 階段の最小半径100cm

階段の形状や素材を選ばないので、らせん階段・手すりのある階段など屋内外を問わず使用可能です。
いつでもデモンストレーション（無料）にお伺いいたします。お気軽にご相談ください。

製品仕様

製品仕様	項目	scalamobil S 45 (車いす仕様)	scalacombi S46 (コンビ仕様)	scalaport S45X7 (ポート仕様)	項目	Action4 (車いす)
	高ハンドル幅 x 奥行	1,167~1,650x430~520x340mm	1,167~1,650x430~520x590mm	1,167~1,650x550~730x550mm	高x幅 x 奥行	435x405 (調整可) x450mm
	本体重量	26.0kg	38.0kg	37.0kg	全 体 幅	595mm
	最大積重量	160kg (利用者体重最大120kg)	180kg (利用者体重最大140kg)	160kg (利用者体重最大120kg)	本 体 重 量	14.0kg
	スカラシリーズ 共通仕様					
モーター	DC24V・200W	連続昇降段数		フル充電時、約300段昇降可能		
充電時間	3.5時間	階 段		高さ20cm以下、奥行11cm以上		
バッテリー	鉛シールド2x12Vx3.4Ah	昇降可能角度		61度		
充電器	入力100V~240V、出力24V・1A	昇降速度		18段/分		



総輸入・販売元

株式会社アルバジャパン

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-8-4 小川ビル203
電話: 03-3984-1345 FAX: 03-3984-1344
Mail: info@alber.jp URL: https://www.alber.jp

公式ホームページ



2025.10



NEW

scalamobil S45 scalacombi S46 scalaport S45X7

可搬型階段昇降機・スカラシリーズ

介護保険対象商品

NEW

可搬型階段昇降機・スカラシリーズ

scalamobil S45

scalacombi S46

scalaport S45X7

これまでにない安全な操作機能を搭載。見やすいディスプレイで、操作するひとの安心がさらにアップしました！

scalamobil S45

スカラモービルS45

スカラモービルS45は、専用車いす（アクション4またはイーウイング）とのセット仕様です。本体から車いすを取り外すことができるので、階段昇降以外では車いすとして使用できます。

Taisコード：00156-000078（本体のみ）
00156-000081（本体+AC4）
00156-000082（本体+イーウイング）



scalacombi S46

スカラコンビS46

スカラコンビS46は、本体に簡易型のいすが直接ついている仕様です。コンパクトな構造のため、狭い階段等での使用にオススメです。

Taisコード：00156-000079



scalaport S45X7

スカラポートS45X7

スカラポートX7は、あなたの車いすに取り付けることができる仕様です。

- 【適合可能条件】
- ① 車いす後輪車輪幅：470～730mm
 - ② 後座高：地面から350mm
 - ③ フレームの高さ：地面から140mm
 - ④ フレーム幅：350～550mm
 - ⑤ アームの掴み部分：地面から600mm

Taisコード：00156-000080



3つの新機能

1 ディスプレイ表示搭載


正しい操作角度がわかるランプ表示

- 緑ランプ：正しい操作角度です！
- 黄ランプ：正しい操作角度からずれています。あわてずに正しい角度に戻しましょう！
- 赤ランプ：危険な操作角度です！正しい操作角度に戻すまでスカラモービルは動かないので落ち着いて正しい角度に戻しましょう！

2 ハンドル

調節可能なハンドル

- ・中央にあるノズルで左右のハンドルを別々に調整できます。
- ・ハンドルは操作者に合わせて調整できます。
- ・ハンドルの幅を調整できるため狭い階段に対応できます。

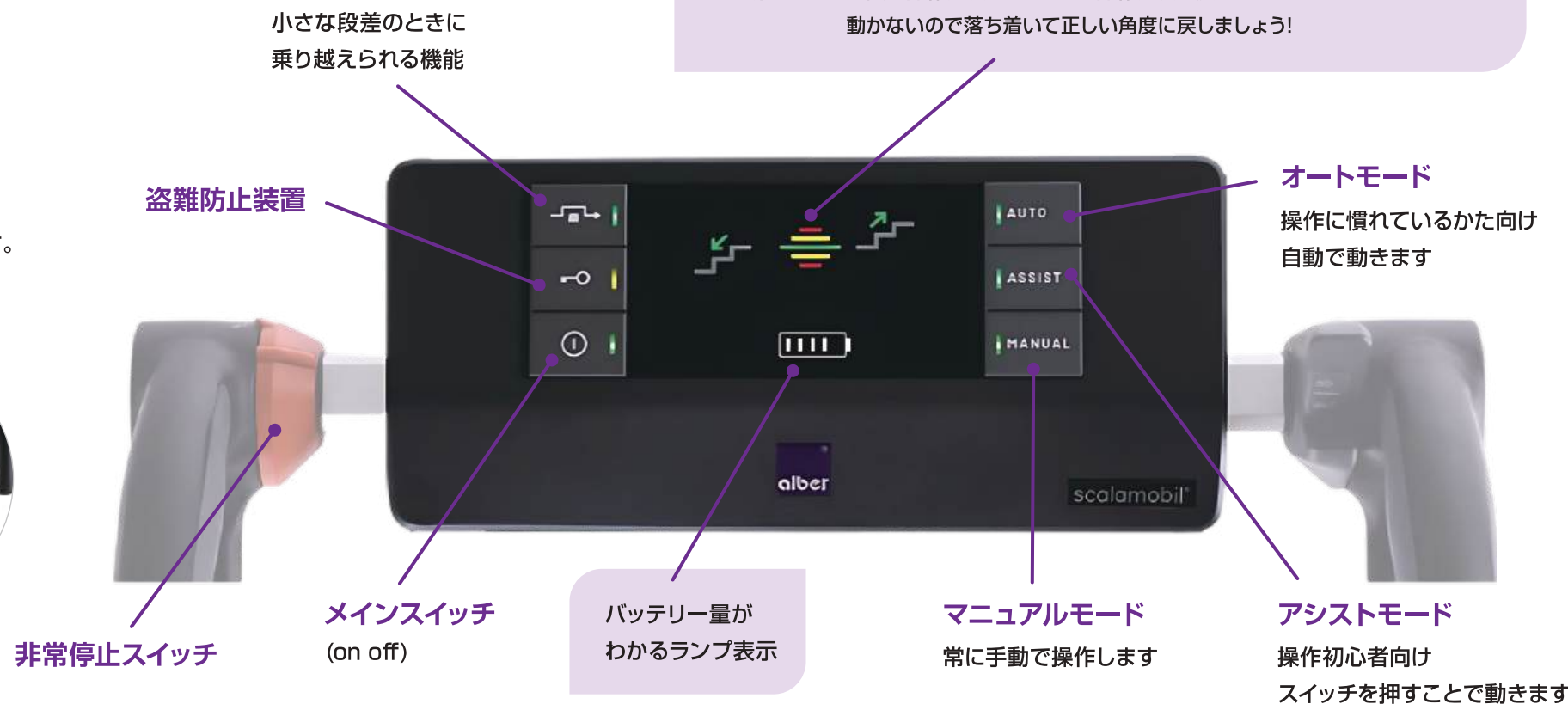

3 操作支援システム

Time-of-flight センサー搭載

リアルタイムで位置を分析し、正しい位置にあった場合にのみに作動します。

